

医用护理垫系列产品使用说明书

提醒使用前请仔细阅读使用说明书

一、【产品名称】：医用护理垫

二、【规格与型号】：（单位：mm）

医用护理垫产品型号按照外形分为：1.平铺型 2.粘贴型 3.活动型 4.S型 5.U型 6.三角形. 产品规格按照产品尺寸分为：							
160*400	210*490	220*500	235*580	240*570	250*330	270*360	270*720
280*400	280*540	280*600	300*400	300*450	300*700	300*780	320*440
320*450	320*460	320*490	320*520	320*540	320*560	320*620	320*630
320*820	330*250	330*450	360*650	380*690	500*400	560*560	600*400
600*450	600*600	600*700	600*750	600*800	600*900	600*1200	600*1500
650*750	650*800	700*1100	700*1200	700*1500	700*1800	750*650	750*900
750*920	750*1000	750*1500	750*2000	800*650	800*750	800*900	800*960
800*1000	800*1200	800*1500	800*1600	820*1015	840*1030	880*750	900*900
900*1200	900*1950	1000*1500	1000*2000	1000*2300	1000*2500	异型垫长度 500-900（单位：mm）	

三、【产品描述】：

由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。

四、【产品性能】：

1、尺寸要求

重量g	±6%
全长mm	±15mm
全宽mm	±15mm
芯体长度mm	±15mm
芯体宽度mm	±15mm

2、性能指标

指标名称	单位	标准要求
吸液量（0.9%的生理盐水）	g	SAP的含量≥45倍、其他≥5倍
保液量（0.9%的生理盐水）	g	SAP的含量≥25倍、其他≥1.5倍
渗漏量	g	无渗漏
PH值	-	4~8.0
交货水分	%	≤10

五、【预期用途】：

病床或检查床上用的卫生护理用品。

六、【禁忌症】：

对本产品过敏者、皮肤表面破损、局部皮肤严重感染者请停止使用。

七、【使用方法】：

医用护理垫（平铺型）：

- 1、可直接接触皮肤使用。
- 2、铺在椅子、床等表面，有效防漏、保持清洁。
- 3、让使用者侧卧，将护理垫置于使用者身下，打开离使用者较远的一边。

- 4、协助使用者转向平卧，打开产品另一边，并适当调整上下左右位置，使护理垫位于使用者身体正下方。

医用护理垫（粘贴型）：

- 1、让使用者侧卧后，展开产品并使腰贴端朝上，调整芯层在腰、臀之间的位置后，打开另一端。
- 2、协助使用者翻向另一侧，展开产品的另一端。
- 3、让使用者平躺并张开双腿，将有随意贴的部分拉到腹部位置，使前后两端对正。胶贴贴合在身体上，然后将两侧弹性隔边拉平，防止尿液外漏。

医用护理垫（活动型）：

- 1、根据图示选择尿片式的医用护理垫
- 2、让使用者侧躺，将产品右半边折起，另半边掀起，包住使用者臀部。
- 2、让使用者转向侧躺，再打开另半边，将产品平铺开。
- 3、使用者向上平卧后，把产品前部向上拉至腹部。
- 4、前部侧边向左右两边拉平整，使后片侧边妥帖包围腹部。
- 5、也可直接放在纸尿裤内使用或撕开背胶，粘在内裤内使用。

医用护理垫（活动型）：

- 1、根据图示选择内部式的医用护理垫（活动型）。
- 2、穿着方式同普通内裤相同，腰部浅蓝色橡筋为产品前部。
- 3、穿上后将两侧隔边拉平，防止尿液外漏

八、【注意事项】：

- 1、本产品为一次性用品，不得二次使用。
- 2、使用本产品后，如果使用者出现肌肤异常状况，请立即停止使用，并向医师咨询。
- 3、产品包装开封后，请放置于干燥通风处，并注意不要让灰尘或小昆虫进入包装内。
- 4、请勿将产品直接暴晒于阳光下，以免造成不良影响。
- 5、产品请勿洗涤，请勿随意丢弃、维护环境卫生。

九、【储存】：

- 1、产品在运输过程中应使用具有防护措施的洁净的工具，防止重压、尖物碰撞及日晒雨淋。
- 2、成品应保存在干燥通风，不受阳光直接照射的室内，防止雨雪淋袭和地面湿气的影响，不得与有污染或者有毒化学品共存。

【备案人名称】：山东晶鑫无纺布制品有限公司

【备案人注册地址】：罗庄区盛庄办事处罗八路 52 号（罗八路与清河南路交汇处东南角）

【住 所】：罗庄区盛庄办事处罗八路 52 号（罗八路与清河南路交汇处东南角）

【售后服务单位】：山东晶鑫无纺布制品有限公司

【联系方式】： 电话：0539-8488858

邮编：276017

【生产备案凭证编号】：鲁临食药监械生产备 20170010号

【产品备案凭证编号】：鲁临械备 20180039 号

【产品技术要求编号】：鲁临械备 20180039 号

【生产日期、生产批号】：见包装喷码

【有效期限】：三年

【说明书编制日期】：2022 年 7 月 1 日