

资料 2

使用说明书和标签样稿

宁波市鄞州华鑫仪器有限公司

宁波市鄞州华鑫仪器有限公司

玻璃体温计使用说明书

【产品名称】 玻璃体温计

【型 号】 三角型棒式（口腔、肛门）、内标式（腋下）。

【适用范围】 供测量人体的体温用。

【结构组成】 玻璃体温计（以下简称体温计）由玻璃管、感温泡和汞组成。

【性能指标】 玻璃体温计（以下简称体温计）外观应透明光滑，顶端应平滑呈圆形。玻璃管毛孔应正直均匀。感温液柱经正面放大后的显象应清晰鲜明，其宽度：三角型棒式体温计不得小于 1.2mm，内标式体温计不得小于 0.8mm。感温泡与玻璃管熔接部位应熔接牢固光滑。感温泡内不得有明显的气泡和玻璃屑等杂质。体温计温度的最小分度值为 0.1℃ 且分度应均匀。标度线、计量数字和标志颜色应牢固；棒式标度线的宽度为 $0.25\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ ，内标式标度线的宽度为 $0.2\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ ，长度为：1℃ 线长于 0.5℃ 线，0.5℃ 线长于 0.1℃ 线；标度线应平直并垂直于玻璃管的中心轴线；计量数字中心应对着主要标度线，位差不应超过一个分度值。体温计应力扩散应呈橙红色。示值允差在 $-0.15^{\circ}\text{C} \sim +0.10^{\circ}\text{C}$ 范围内；体温计感温液柱不应有中断、自流、难甩现象。

【使用方法】 体温计使用前应用浓度为 75% 的含水酒精浸 3 分钟消毒，用手指捏住体温计上端向下甩动，使水银柱甩到 35.5°C 以下。然后将体温计放进病人的需要测温的腋下或口腔舌下部位或肛门，3 分钟后取出读数。读数时将体温计的感温泡略下斜，三角棱镜对准视线将体温计稍向前后转动读数。口腔部位测定的水银柱顶端所对应的温度刻线为实际体温，腋下部位测定读数应加上 0.5°C 为实际体温，肛门部位测定读数应减去 0.3°C 为实际体温。

【注意事项】

（1）在测量体温前凡影响实际体温的因素（如刚刚进行剧烈运动、饮开水或冷饮等）均应避免。

（2）体温计最高温度 42°C ，因此在保管或消毒时温度不可超过 42°C 。

（3）由于体温计感温泡玻璃较薄，贮运使用过程中应避免过剧震动。

（4）每支产品上应有“”强检标志：

（5）肛门体温计经消毒后涂以润滑油脂，然后插入肛门，测量时用手捏住防止滑出跌碎。

【禁忌症】 暂无发现。

【不良反应】 目前尚无不良反应。

【维护和保养】

(1) 本品在日常维护中应注意和硬质物品碰撞。

(2) 在每次使用开始前和结束后均要使用 75%的含水酒精浸 3 分钟消毒。

【贮存条件/方法】 包装后的体温计应贮存在环境温度不超过 42℃、空气干燥、相对湿度不超过 80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【包装规格】 10 支/小包装。

【生产日期】 见产品标签。

【有效期限】 在遵守贮存和使用规则的条件下：从出厂日（按产品生产年代号）起，在两年内不能正常使用时，我厂无偿给予修理或更换；定期检验，失准报废。

【说明书的编制或者修订日期】 2016 年 8 月 30 日编制

【注册人名称/售后服务单位/生产企业名称】 宁波市鄞州华鑫仪器有限公司

【注册人/生产企业住所】 宁波市鄞州区云龙镇陈黄村 邮编：315135

【注册人/生产企业联系方式】 电话：0574-88067226 ， 传真：0574-88067331

【生产企业名称】 宁波市鄞州华鑫仪器有限公司

【生产企业住所】 宁波市鄞州区云龙镇陈黄村 邮编：315135

【生产企业联系方式】 电话：0574-88067226 ， 传真：0574-8888067331

【生产许可证编号】

【医疗器械注册证编号】 / 【产品技术要求的编号】

宁波市鄞州华鑫仪器有限公司
玻璃体温计产品最小销售单元的追溯标签样稿

《玻璃体温计》标签

产品名称：

批号：

规格型号：

检验员代号：

生产日期：

有效期限：

【生产企业名称】 宁波市鄞州华鑫仪器有限公司

【生产企业住所】 宁波市鄞州区云龙镇陈黄村 邮编：315135

【生产企业联系方式】 电话：0574-88067226 ， 传真：0574-88067331

【生产许可证编号】

【医疗器械注册证编号】 / 【产品技术要求的编号】

注：其他内容详见本品使用说明书。